

Comfishield Stomibeskyttelse

Beskytt stomien din mot uønsket støt og slag med behagelige Comfishield! Beskyttelsen består av to deler, et mykt underlag som festes bak stomiposen og et skjold som festes til underlaget med borrelås. Det er enkelt å bruke og kan brukes under vanlige klær.

- Diskret design, bygger lite ut under klærne
- Beskytter mot press fra belter, hunder, små barn mm.
- Velegnet ved kontaktsport og fysisk aktivitet
- Beskytter stomien i mageleie
- Passer til alle posesystemer
- Kombiner gjerne med Comfizz Fikseringsbelte

På baksiden kan du se hvordan du bruker Comfishield Stomibeskyttelse.

Størrelser

Comfishield er tilgjengelig i to farger, sort og sand. Den kommer i tre størrelser, 60, 75 og 90 mm. Størrelsen indikerer bredden på hullåpningen i underlaget. Det skal passe rundt ringkoblingen på 2-delt system og rundt hudplaten på 1-delt system.

Mål bredden på 1-delt slik. På 2-delt system måles bredden på koblingen der stomiposen festes til hudplaten



Vedlikehold

Skjoldet og underlaget vaskes i mildt såpevann. Tørkes flatt. Unngå høy varme da det kan svekke borrelåsfestet.



ubri medical



Slik tar du på Comfishield Stomibeskyttelse



Comfishield på reiser

“Jeg har brukt produktet siste året. Helt utmerket når jeg reiser med bil hvor jeg slipper å ha setebeltet over stomien. Jeg har etterhvert begynt å bruke den nesten daglig spesielt når jeg er ute og arbeider med leggpose koblet til stomiposen. Anbefales!”

De beste trusene for meg

“Trusene holder posen trygt på plass uansett aktivitet. De holder formen godt i vask, tørker hurtig og er luftige å ha på. Med trusene fra Comfizz glemmer jeg ofte at jeg har stomi!”

ubri medical



Comfizz Støtteundertøy



ubri medical

Comfizz Fikseringsbelte

Comfizz Ostomy Waistband with Silicone er et mykt og elastisk fikseringsbelte med Level 1 støtte. Fikseringsbelte dekker diskret posen og holder stomiutstyret sikkert på plass. Det kan brukes ved alle typer stomier. Comfizz fikseringsbelte er godkjent for refusjon av Helfo.

- Trygt & enkelt å bruke
- Synes ikke under klærne
- Silikonlinning oppe og nede forhindrer at beltet “ruller”
- Level 1 gir mild støtte
- Sømløst & pustende design
- Forhindrer irritasjon fra buksekanter og belter
- Velegnet under intimitet
- Gir ekstra sikkerhet ved fysisk aktivitet
- Kan brukes brokkforebyggende i kombinasjon med Comfizz Støtteundertøy
- Fås på blå resept ved stomi, resept 505
- Bestilles hos bandagist og apotek



Comfizz Fikseringsbelte er velegnet til fiksering av Comfishield Stomibeskyttelse

Størrelsesveiledning

Comfizz størrelser er basert på midjemål i cm. Mål rundt det smaleste punktet av midjen og over stomien. Sammenlign de to målene med tabellen under. Ved et brokk tas målet liggende når brokket er helt avslappet. Materialet er elastisk slik at størrelsene kan overlappe. Ta hensyn til hvor stramt du foretrekker at undertøyet sitter.

Helfonr.	Produktnavn	Str.	Midje
836415	Comfizz Ostomy Waistband with Silicone 18 cm sort	S/M	71-81
814906	Comfizz Ostomy Waistband with Silicone 18 cm sort	M/L	86-96
841739	Comfizz Ostomy Waistband with Silicone 18 cm sort	L/XL	101-111

Behagelig støtteundertøy

Comfizz støtteundertøy er kjent for høy kvalitet og behagelig kompresjon. Støtteundertøyet er spesielt designet til stomiopererte og kan brukes hele dagen uten å forstyrre stomien. Undertøyet er tilgjengelig i Level 1, mild støtte og Level 2, medium kompresjon, velegnet ved brokk og fysisk aktivitet. Kolleskjonen består av unisex boxere, dametruser, stomibeskyttelse og badeunderdeler til dame og herre.

- Behagelig støtte til alle typer stomier
- Høyt liv skjuler posen og holder stomiutstyret trygt på plass
- Mykt, sømløst & pustende materiale
- Holder inn og glatter ut
- Velegnet ved fysisk aktivitet
- Kan dempe brokksymptomer



Comfizz High Waist Brief Level 1 og 2



Comfizz Unisex Boxer Level 1 og 2



Comfizz Badeboxer Herre Level 2



Comfizz Badetruse Level 2

Se hele kolleksjonen og bestill på ubrimedical.no. Comfizz er ikke dekket på blå resept. Støtteundertøyet er også tilgjengelig hos bandagist og apotek.

Comfizz Fikseringsbelte til barn

Comfizz fikseringsbelte er en liten perle av et plagg for barn med stomi! Det sømløse og elastiske beltet kan benyttes dag og natt uten å forstyrre stomien. Beltet er godkjent for refusjon av Helfo.

- Lett å bruke & behagelig å ha på seg
- Synes ikke under klærne
- Mykt, sømløst & pustende materiale
- Gir trygghet under lek & aktivitet
- Holder stomiutstyret sikkert på plass
- Kan brukes dag og natt
- Dekker diskret stomiutstyret i garderobe og prøverom
- Kan brukes som badebelte
- Level 1 gir mild støtte



Helfonr.	Produktnavn	Str.	Midje	Farge	Resept
952458	Comfizz Stomibelte Barn	XS	35-40	Sort	505
957856	Comfizz Stomibelte Barn	S	43-48	Sort	505
956239	Comfizz Stomibelte Barn	M	51-56	Sort	505
979543	Comfizz Stomibelte Barn	L	58-63	Sort	505

Ta gjerne kontakt med oss!

92 11 72 67

Trenger du hjelp og veiledning om støtteundertøy, er vi her for å hjelpe deg. Mandag - Fredag 09:00-15:00

T: +47 92 11 72 67
E: post@ubrimedical.no

ubrimedical.no

Instagram: [ubri.medical](https://www.instagram.com/ubri.medical)
Facebook: [Ubri Medical](https://www.facebook.com/Ubri.Medical)