



**Trio Elisse® Smertefri
Barrierefilm**

**say hello
to healthier
skin**

trio Elisse®



får du rød og sår hud av regelmessige posebytter?

Trio Elisse® skaper en beskyttende barriere mellom stomiposen og huden din.



Forebygger skade

Forhindrer urin og avføring fra å komme i kontakt med frisk eller skadet hud



Beskytter «utstatt» peristomal hud

fra belastningen av regelmessige posebytter ved å bygge en beskyttende hinne mellom hud og stomibandasje



Lar huden få puste

naturlig, noe som bidrar til en sunnere hud



Lindrer irritert hud

Vår unike silikonformel beroliger rød og kløende hud



360° presis spray

sprayer presist fra alle vinkler



Tørker på sekunder

Hurtigtørkende, langvarig beskyttelse

Trio Elisse® Silikon Teknologi

Trio Elisse® Smertefri Barrierefilm har en hypoallergenisk formel i 100% silikon som skaper en beskyttende barriere mellom hud og stomibandasje. Den pustende hinnen beskytter huden mot klebere og stomiinnhold. Trio Elisse® inneholder ingen ubehagelige kjemikaler, det sikrer en smertefri påføring med opptil 100 timers beskyttelse.

slik bruker du Trio Elisse®

Trio Elisse® bruker «bag in can» teknologi – en resirkulerbar og bærekraftig emballasje uten forurensende stoffer som brukes i tradisjonelle aerosoler. Emballasjen sikrer at 100% av produktet brukes.



1. Sørg for at huden din er ren og tørr etter at du har fjernet stomiposen/hudplaten
2. Hold Elisse® ca. 10 cm fra huden og spray rundt stomien hvor kleberen på hudplaten, stomiposen eller bandasjen fester til huden
3. Ved behov kan Trio Elisse® brukes for å bygge opp lag med beskyttelse, spray på, la det tørke og spray igjen.
4. La huden tørke. Det tar bare noen sekunder. Sett deretter på stomiposen/hudplaten/bandasjen.

**Også tilgjengelig
som servietter**

Praktisk størrelser når du er ute eller på reise.



Trio Elisse® er tilgjengelig på Blåresept hos bandagister og apotek over hele landet.

Vi håper du blir fornøyd med Trio Elisse. Dersom du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller en gratis prøve, ta kontakt med vårt kundesenter.

Trio Elisse® spray

Varenummer	Pakningsstørrelse	Helfo varenummer
TR204	50ml spray	873640

Trio Elisse® Servietter

Varenummer	Pakning	Helfo varenummer
TR203	30 servietter	819640

**ubri
medical**

 ubrimedical.no

 921 17 267

 post@ubrimedical.no



Trio Healthcare Ltd. Registered in England. No: 05776276. Registered office: Units 2A-2B, Sandylands Business Centre, Carleton New Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2AA, UK.

M0152/no