



**Trio Silken® Silikon
Stomigel**

**say goodbye
to leaks**

(trio) Silken®



får du lekkasjer av ujevnheter,
arr eller hudfolder rundt stomien?

**Trio Silken® smertefri silikongel
svir ikke på huden og skaper
en jevn overflate for optimal
påsetting av stomiposen.**



Lar huden få puste,
forebygger hudskade og
hjelper til med å holde
huden frisk



Fleksibel og sikker
Følger kroppens bevegelser,
fyller åpninger forårsaket
av hudfolder, sprekker og
ujevnheter.



Raskt og enkelt
Fjernes i et stykke og
etterlater ingen rester på
huden




**Beskytter huden rundt
stomien**
Forhindrer stomiinnhold fra å
komme i kontakt med huden

Trio Silken® Silikon Stomigel med Sil2 Breathable Silicone Technology®



slik bruker du Trio Silken®

1. Sørg for at huden rundt stomien er ren og tørr.
2. Åpne tuben ved å skru av lokket. Snu lokket på hodet og punkter folien ved å trykke lokket ned i tuben.
3. Klem forsiktig på tuben og påfør gel der du ønsker å fylle ut hudfolder, sprekker eller ujevnheter. Silken påføres direkte på huden før hudplaten settes på. Bare en liten mengde Trio Silken® er nødvendig.
4. Det er ikke nødvendig å spre gelen eller vente til den er tørr. Bare sett posen eller hudplaten på som normalt og plasser den direkte på den fuktige gelen. Trio Silken® vil stivne sakte og forblir myk inntil ujevnhetene i huden er fylt ut.

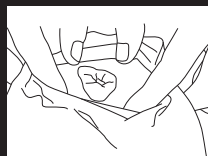

Trio Silken® er tilgjengelig på **Blåresept hos alle landets apotek og bandagister**

Vi håper du blir fornøyd med Trio Silken®. Dersom du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller en gratis prøve, ta kontakt med vårt kundesenter.

Trio Silken®

Varenummer	Helfonnummer	Pakning
TR1070	972110	60g tube

**ubri
medical**



ubrimedical.no



921 17 267



post@ubrimedical.no



Trio Healthcare Ltd. Registered in England. No: 05776276. Registered office: Units 2A-2B, Sandylands Business Centre, Carleton New Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2AA, UK.

M10154/n